


G-JET

Tubo de Alimentación Gastro-Yeyunal



Reduce las obstrucciones:

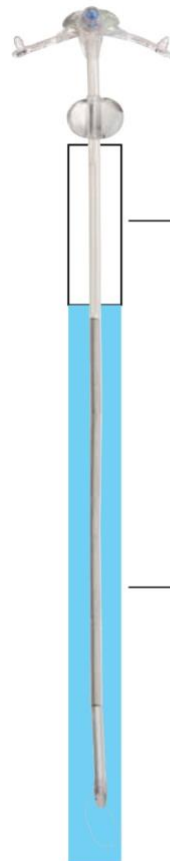


El botón G-JET® se transforma internamente de un diseño de tres cavidades en su segmento proximal (gástrico) a una cavidad grande en su segmento distal (yeyunal).




La cavidad yeyunal de G-JET proporciona un crecimiento mayor a **60%** en el área transversal para proporcionar un mejor flujo.

Con menos obstrucciones, los pacientes pueden necesitar menos reemplazos de tubos.

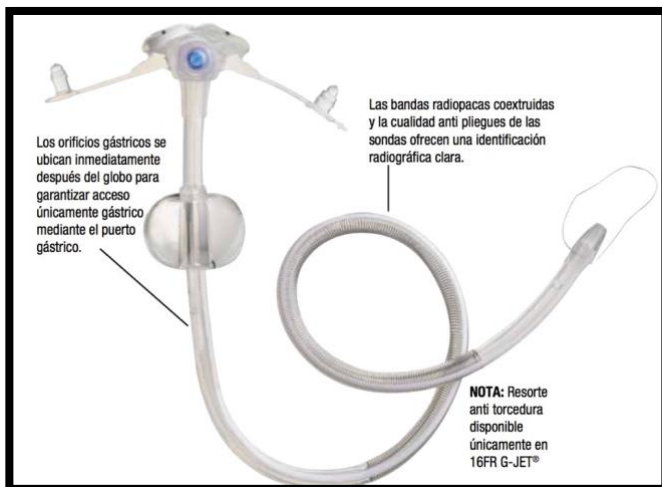

El botón **AMT G-JET**, se utiliza en personas que no pueden ingerir alimentos por la boca o que no pueden obtener la cantidad de nutrientes necesarios para satisfacer sus necesidades, enviando el alimento líquido (Fórmula) directamente al intestino delgado al saltar la boca, el esófago y el estómago. Una vez que la fórmula ingresa al cuerpo mediante el botón AMT G-JET, la digestión funciona de la misma manera que cuando la comida se ingiere por la boca, obteniéndose los mismos nutrientes que se incorporan a través de la boca, ofreciendo una dieta completa y saludable, por lo que se puede continuar el crecimiento y desarrollo.

Al igual que los botones Mini One Balloon de AMT, el globo G-Jet tiene la forma de una manzana que cubre una mayor área de superficie, creando un mejor sellado gástrico, reduciendo fugas. Presenta un balón o globo personalizable, donde al igual que los botones MINI ONE BALLOON, el volumen de llenado del globo o balón, puede ajustarse con facilidad para reducir pérdidas y mejorar la comodidad del paciente.

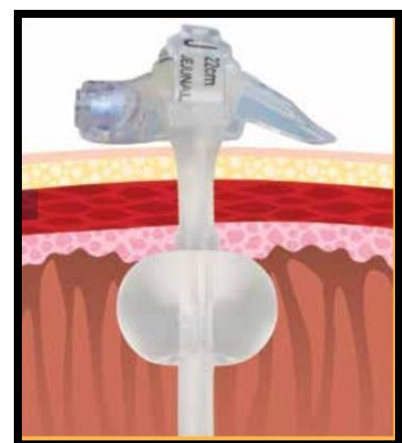

Características mejoradas:

Tecnología antitorceduras

Refuerzo con resorte* mantiene un flujo superior, aprobado para MRI



El dispositivo es condicional de MRI



Conexiones nocturnas más fáciles

Puerto yeyunal y conector yeyunal
Luminosidad en la oscuridad

Puerto Med mejorado

Mayor retención del tapón que reduce las posibilidades de "alimentar la cama".



TABLA CON EL VOLUMEN DE LLENADO DEL BALÓN



Tamaño francés	Mínimo	Recomendado	Máximo
14FR	3 ml	4 ml	5 ml
16FR	4 ml	6 ml	8 ml

Reduce el riesgo de conexiones erróneas:

Alimentar accidentalmente al estómago en lugar del yeyuno puede ser peligroso. El botón G-JET® trata este riesgo de varias maneras.

Un dispositivo claramente rotulado:



Longitud yeyunal impresa en la correa "J" y grabada con láser en la almohadilla externa.

Las cubiertas del puerto G e Y con tapones de seguridad tienen distintas formas para una diferenciación táctil.



Gástrico blanco
Conjunto de extensión del acceso



Yeyunal verde brillante
Equipo de acceso de alimentación

Para la alimentación gástrica solo se ajustará el puerto gástrico (blanco) y la alimentación yeyunal sólo se ajustará al puerto yeyunal (verde)



Conjunto de extensión gástrica (blanco):
haga un giro de 3/4 en dirección horaria

Conjunto de alimentación yeyunal (verde brillante):
haga un giro de 1/4 en dirección horaria

MANTENIMIENTO DEL BALÓN

- Verificar que el volumen de llenado del balón sea el recomendado por el médico.
- Al sostener la almohadilla externa en su lugar, insertar la jeringa en la válvula de llenado del balón y extraer el agua y controlar la cantidad.
- Volver a llenar el balón con la cantidad originalmente indicada de agua o según lo indicado por el médico.



MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE EXTENSIÓN Y DE ALIMENTACIÓN

- Los equipos de alimentación y extensión y las jeringas deben limpiarse con agua tibia y jabón después de cada uso.
- Asegurar el correcto enjuague para extraer los residuos de fórmula o jabón.
- Para una alimentación continua, se debe limpiar el conjunto de alimentación al menos una vez al día.
- Para evitar obstrucciones, siempre enjuagar el equipo de alimentación y extensión después de alimentar y/o administrar medicamentos.

Códigos	Medidas
GJ-1410-22	14 FR x 1.0 cm x 22 cm
GJ-1415-15	14 FR x 1.5 cm x 15 cm
GJ-1415-22	14 FR x 1.5 cm x 22 cm