

Manual de formación del equipo de infusión Cleo® 90



Consulte las instrucciones de uso si desea obtener un listado completo de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

INTRODUCCIÓN DEL PUERTO Y CONEXIÓN DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

1. Lávese las manos exhaustivamente.

2. Prepare el puerto y déjelo secar.

3. Gire la tapa para extraerla.

4. Inspeccione el dispositivo para ver si están el adhesivo y la aguja de inserción.

5. Presione firmemente. Sosténgalo durante cinco segundos. Tire para retirarlo.

6. Presione para fijar el adhesivo.

7. Conecte el tubo y llénelo (según las instrucciones de uso).

8. Presione los brazos del conector del puerto hacia adentro y deslícelo para abrirlo por completo.

9. Conecte el tubo al puerto según la posición más adecuada. Cleo® 90 tiene ocho posibles posiciones.


10. Cierre el conector. Un clic confirma el cierre.

11. Llene la cánula con la medicación.

- La cánula de 6 mm tiene un volumen de cebado de 0,002 mL.
- La cánula de 9 mm tiene un volumen de cebado de 0,003 mL.



12. Compruebe que la aguja se haya retraído.

DESCONEXIÓN

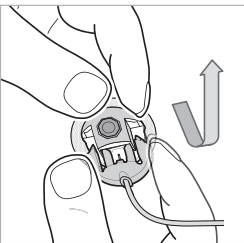

Abra el conector presionando los brazos del conector del puerto hacia dentro y deslizando para abrirlo por completo.

RETIRADA DEL PUERTO DE INYECCIÓN

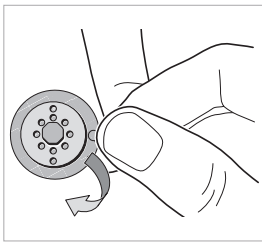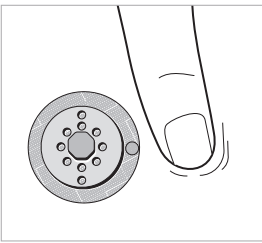

CAMBIO DEL CATÉTER CLEO® 90

Cambie el catéter de acuerdo con la política y los procedimientos de su centro.

LOS PRODUCTOS AQUÍ DESCRITOS PUEDEN NO ESTAR AUTORIZADOS O DISPONIBLES PARA SU VENTA EN CANADÁ Y OTROS PAÍSES

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, EE. UU.
Tel.: 1-614-210-7300
Número gratuito para EE. UU.: 1-800-258-5361

Puede encontrar la información de su contacto local en www.smiths-medical.com/customer-support

Smiths Medical forma parte del negocio de tecnología mundial Smiths Group plc. Consulte las instrucciones de uso/manual del operador si desea obtener un listado completo de las indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones. Cleo y la marca de diseño Smiths Medical son marcas comerciales de Smiths Medical. El símbolo ® indica que la marca está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de Estados Unidos y algunos otros países. El resto de nombres y marcas mencionados son marcas comerciales o de servicio de sus respectivos titulares. ©2016 Smiths Medical. Reservados todos los derechos. IN193874ES-052016

MPAUC-1374

CE Rx
0473 ONLY

smiths medical