

CEPILLO CONEXIÓN ENTERAL

CÓDIGO: ENCB**MARCA: G-BUK. LÍNEA ENTERAL**
PROCEDENCIA: INGLATERRA

Cepillo de conexiones enterales de un solo uso, destinado a limpiar los desechos de los conectores y tapas enterales.

Características

- Cepillo diseñado para encajar perfectamente con las conexiones ENFit, manteniendo el conector libre de escombros, extendiendo la vida útil del dispositivo enteral
- Cada cepillo tiene una tapa individual para propósitos de control de infecciones.
- Materiales:
 - Mango y tapa de plástico púrpura.
 - Alambre de acero inoxidable cubierto de cerdas suaves.
- El tamaño del pincel encaja perfectamente en las grietas de los conectores enterales.

Uso y recomendaciones

1. Remover la tapa del cepillo.
2. Sumergir las cerdas en agua limpia.
3. Insertar el cepillo en el conector y la tapa EnFit y girando alrededor para quitar los escombros.
4. Enjuagar las cerdas en agua limpia y repetir, hasta que los desechos visuales sean removidos del conector.
5. Descartar el cepillo del conector enteral después de usarlo según el protocolo de la institución.

**Biocompatibilidad**

Todos los componentes del cepillo son biocompatibles y un solo uso, no estériles.

Empaque

El producto viene embalado a granel no estéril, en bolsa re sellable de 50 unidades. Cada cepillo viene con su tapa protectora.

Certificaciones

- ISO 13485 - ECC.

Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.