

# CATÉTER PERITONEAL PERITX™

CÓDIGO: 50-9050

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU



Sistema de catéter peritoneal PeritX™, diseñado con tecnología de vacío activo para ayudar a facilitar el drenaje de líquido de ascitis, permite a sus pacientes gestionar el líquido de la ascitis maligna y no maligna en casa, eliminando la necesidad de repetir los procedimientos de paracentesis

## Indicaciones

- El sistema de catéter peritoneal PeritX™ está indicado para el drenaje intermitente de larga duración de una ascitis maligna y no maligna sintomática recidivante que no responde al tratamiento médico de la enfermedad subyacente y para el tratamiento paliativo de los síntomas relacionados con la ascitis recidivante.
- El uso del catéter peritoneal PeritX™ para ascitis no maligna está limitado a pacientes intolerantes o resistentes al tratamiento médico máximo, resistentes a paracentesis de gran volumen (PGV) y que no sean candidatos para una derivación portosistémica intrahepática transyugular o una PGV.
- El catéter peritoneal PeritX™ está indicado para su uso únicamente en adultos.
- El tubo de drenaje bloqueable (Figura 2) se utiliza para drenar líquidos mediante un sistema de aspiración de pared estándar, un sistema de drenaje de sello de agua, una botella de vacío estándar u otro método apropiado

## Características

- El catéter peritoneal PeritX™ consta de un catéter de silicona fenestrado de 15.5 FR x 71 cm, suave y flexible que se ajusta al espacio peritoneal y ayuda a minimizar las molestias en el lugar de inserción. con un mecanismo de válvula y un manguito de poliéster.
- Las fenestraciones que presenta son grandes y lisas favoreciendo el drenaje y ayudan a reducir el riesgo de oclusiones.

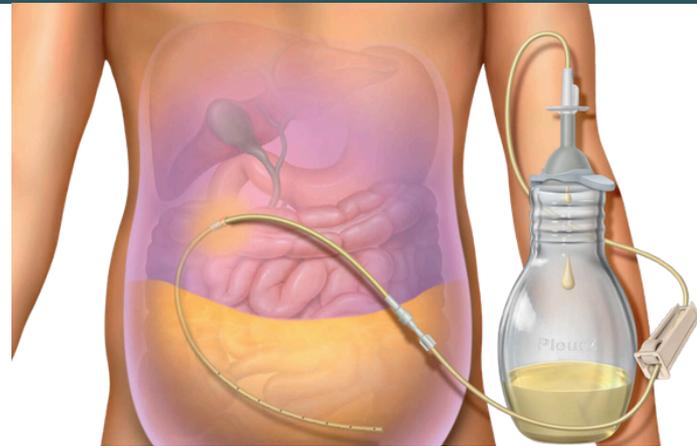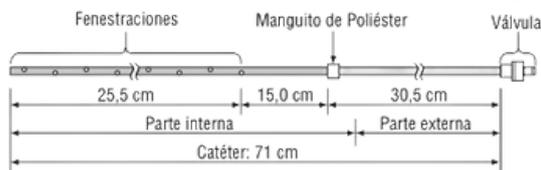

- Presenta una tira de sulfato de bario que se extiende por toda la longitud del catéter, proporcionando una mayor visibilidad bajo la radiografía.
- Presenta una válvula de seguridad patentada que ayuda a evitar el paso inadvertido de aire o líquido a través del catéter, así como a reducir el riesgo de desconexión que se puede producir con una conexión luer estándar.
- Cuenta con una abrazadera de poliéster que promueve el crecimiento del tejido para ayudar a reducir el riesgo de infección y a sujetar el catéter de forma segura en su sitio
- Posee una pinza de rodillo que proporciona un control fácil del flujo de drenaje para mayor comodidad.
- El catéter peritoneal PeritX™ está diseñado exclusivamente para el uso con las botellas de vacío PleurX™, botellas de vacío de vidrio y el tubo de drenaje bloqueable para la conexión al dispositivo de succión de pared o portátil.

# CATÉTER PERITONEAL PERITX™

## Componentes

- Catéter peritoneal PeritXTM (15,5 Fr; 71 cm).
- Cánula introductora con aguja.
- Jeringa de 10 ml .
- Cánula punta J, 60 cm.
- Aguja introductora desplegable, 16 Fr; largo dilatador: 17,8 cm; largo funda: 14 cm.
- Tunelizador.
- Tope de espuma para la aguja.

## Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único, apirógeno.

## Empaque

El producto viene embalado en caja unitaria, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

## Almacenamiento

El producto debe ser mantenido en un lugar limpio, seco

## Certificaciones

- ISO 13485:2016.
- FDA .

