

LYMPH FLOW PRESSURE PAD

CÓDIGO: 020

MARCA AMOENA
PROCEDENCIA: ALEMANIA

Almohadilla de presión de silicona en formato cuadrado que puede introducirse bajo el tejido de la prenda en el punto deseado. Por medio de presión bidimensional, se pretende impedir la formación de edemas y favorecer el retorno venoso o el drenaje linfático mediante el aumento de la presión intersticial

Características

- Almohadilla de presión de silicona en formato cuadrado: (100% silicona médica, biocompatibilidad probada según ISO 10993), ideal como complemento a la prenda de compresión para ejercer una presión más específica y apoyar localmente la presoterapia.
- La superficie estructurada proporciona un ligero efecto de micro-masaje, favoreciendo la relajación del tejido fibrótico, además de favorecer un ligero masaje sobre el tejido cicatricial. La superficie estructurada debe ir sobre la piel con el fin de aflojar el tejido fibrótico.
- Al ser colocada bajo el sujetador/prenda de compresión directamente sobre la piel aumenta la presión específica y apoya la terapia de compresión en edemas localizados.
- Lavable y reutilizable, fácil de limpiar para uso diario, se entrega con un set de limpieza
- Tamaño: 100 x 110 mm. Talla única.
- Antes de la primera aplicación y antes de cada uso, se debe limpiar Lymph Flow Almohadilla Mamaria con el limpiador Amoena y un cepillo suave.

Materiales

Polidimetilsiloxano, película de poliuretano, película protectora de polipropileno (PP).

Certificaciones

- ISO 9001
- ISO 13485
- ISO 14001
- CE



Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

Empaque

El producto viene embalado con su identificación y características.

