

STATLOCK EPIDURAL

CÓDIGO: VEDC

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU.

Dispositivo de estabilización diseñado para la seguridad de los catéteres epidurales utilizados para la anestesia regional.

Indicaciones de Uso

Estabilización para catéteres epidurales

Contraindicaciones

- Alergias conocidas a cinta adhesiva.
- Sensibilidad conocida a la benjuina.

Características

- Cuenta con un retenedor de serpentina con un núcleo adhesivo integrado para mayor seguridad
- Alternativa más efectiva que la cinta para ayudar a mejorar los resultados clínicos, la calidad de la atención y las eficiencias económicas.
- Está diseñado para la seguridad de los catéteres epidurales utilizados para la anestesia regional.
- Es compatible con prácticamente todos los catéteres epidurales de calibre 18-20.
- Es de un solo uso y debe ser reemplazado cada 7 días.
- Evitar el contacto del dispositivo de estabilización con alcohol o acetona, ambos pueden debilitar la unión de los componentes y la adherencia de la almohadilla del dispositivo.
- Retirar el aceite y la crema hidratante del área específica de la piel

Biocompatibilidad

- Dispositivo estéril de uso único y libre de látex, no contiene metal y DEHP (Ftalatos).



Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 25 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, de un solo uso, libre de látex y DEHP (Ftalatos)

Certificaciones

- ISO 13485
- FDA